

ALL BLOCK

KF94

<医薬部外品>

MASK

オールブロック マスク KF94




用途：風邪、花粉、黄砂、PM2.5、防疫用

構造：4重構造保護フィルター 3D 立体設計


製品特徴：・ 医薬部外品 許可製品

- ・ 花粉、黄砂、PM2.5 等から呼吸器を保護
- ・ 人体工学による 3D設計で快適
- ・ 3つ折り式で唇に触れない
- ・ 4重構造の高効率静电フィルターを使用

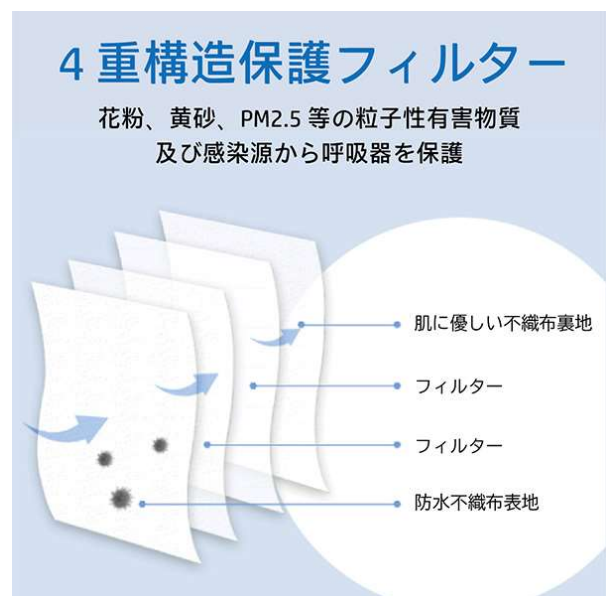


伸縮性の優れたイヤーバンド

長い時間着用しても耳が痛くない

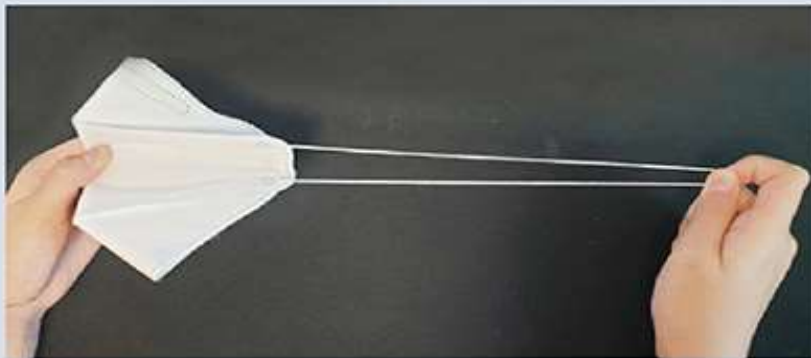

鼻の部分もしっかり密着する設計で、
メガネ着用時も曇りづらい

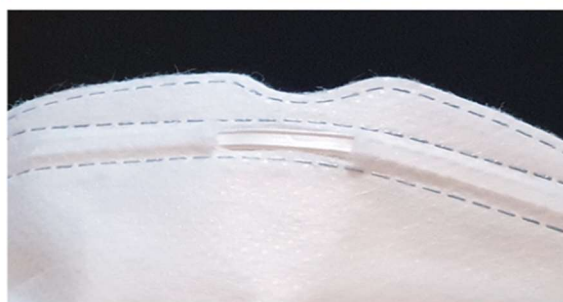

HOW TO USE

マスクの付け方

下記の順番通り、マスクを顔にフィットするように着用して下さい。



STEP 1

マスクの内側が汚れていないかを確認、
顔から鼻と口を完全に覆う
ように着用します。



STEP 2

紐をを耳にかけて
固定します。



STEP 3



指で鼻の形に沿う
ように押さえます。



STEP 4

両手でマスク全体を覆い
隙間をチェックしながら
顔に密着するように
着用します。

製品サイズ

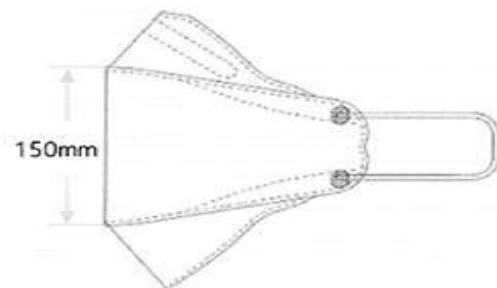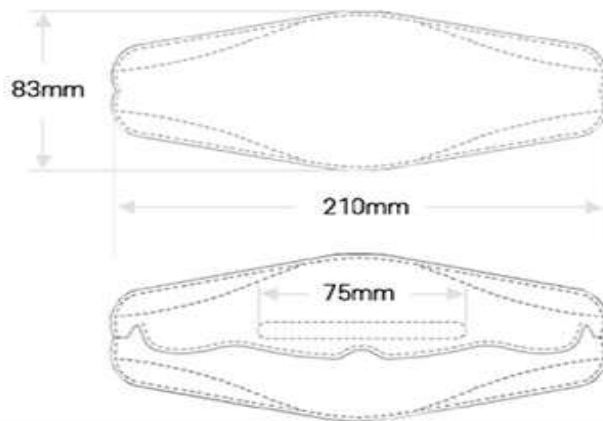

衛生的な個別包装



全成分：

裏地（不織布：ポリプロピレン）、
フィルター（不織布：ポリプロピレン）、
中間材（不織布：ポリプロピレン）、
表地（不織布：ポリプロピレン）、
ノーズワイヤー（ポリプロピレン被覆針金）、
イヤーバンド（スパンテックス、ナイロン）

0.4 ミクロンサイズの粒子の侵入を 94% 以上遮断できる 医療用レベルの防御効果



韓国食品医薬品安全処許可製品

KF94 認証とは？

「0.4 ミクロンサイズの粒子の侵入を 94% 以上遮断できる」という規格です。
韓国食品医薬品安全庁の厳しい試験基準を満たさなければ取得できないため、
高い安全性が保証されています。

粒子の侵入を遮断率




顔面空気抵抗

空気を吸う時、マスク内部が受ける抵抗



漏れ率

マスクと顔の隙間から空気が漏れる割合

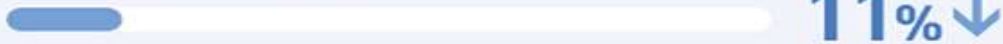

米国が定めた基準（N95）及び日本の国家検定区分（DS2）による
マスクと同等の規格品です。

使用上の注意	・お肌に異常がある時や、かゆみ・発疹などの症状があらわれた場合はすみやかに使用を中止し、医師にご相談ください。 ・本品は使いきりですので、洗濯による再使用はできません。 ・衛生的にご使用いただくために、1日1枚のご使用をお勧めします。 ・本体のワイヤーを繰り返し折り曲げますと折れる恐れがありますのでご注意ください。 ・本品は有毒な粉塵やガス等の発生する場所でのご使用はできません。 ・高温・多湿の場所に保管しないでください。 ・火気のそばでは使用しないでください。 ・酸素濃度が18%未満の密閉された空間では使用しないでください。 ・激しい運動時には利用しないでください。 ・呼吸器、心血管疾患、妊婦、お子様、高齢者などのマスク着用で呼吸が不便な場合は、直ちに使用を中止し必要に応じて医師などの専門家・機関に相談してください。
サイズ	約 83mm x 210mm x 150mm * 製品サイズの画像をご覧ください。 成人サイズです 男女兼用
素材構成	不織布、フィルター素材 飛沫をプロテクトする外カバー、高ろ過性と撥水性フィルター、抗菌と防臭処理フィルター合わせて高機能4層構造です。
原産地	韓国製

製造番号及び使用期限： 別表記

効能効果： 花粉、黄砂、PM2.5 等の粒子性有害物質及び感染源から呼吸器を保護

保管方法： 密閉容器、室温(1～30℃保管)

包装： 個別衛生包装 (1枚入)

全成分： 裏地(不織布:ポリプロピレン)、フィルター(不織布:ポリプロピレン)、中間材(不織布:ポリプロピレン)、表地(不織布:ポリプロピレン)、ノーズワイヤー(ポリプロピレン被覆針金)、イヤーバンド(スパンテックス、ナイロン)

輸入販売元： S-ONE CORPORATION (有限会社エスワン)